

Vejledning i brug og rengøring af ENFit connector



- 1. Rengør.** Efter hvert måltid: Skyl Mic G igennem med tempereret vand, og rengør nede i connectorerne - brug evt. en ren tandbørste.

- 2. Tilslut.** Sørg for, at sprøjten/madslangen er korrekt tilsluttet. Undgå at skrue den for stramt – og STOP, når du mærker modstand.



- 3. Proppen.** Sørg for, at proppen slutter tæt: Sæt proppen i, og drej en kvart omgang – så remmen er lige. Er remmen skæv, kan det medføre lækage. Drej modsat, når proppen skal løsnes for rengøring.

- 4. Placering.** Sæt sprøjten lige ned i connectoren – så gevindet ikke tager skade. Undgå at skrue den for stramt – og STOP, når du mærker modstand.



- 5. Flere tilslutninger.** Undgå at komme i kontakt med dele, der sidder i den anden port.

- 6. Frakobling.** Undgå at tvinge delene fra hinanden, hvis de er klistret sammen. Forsøg at opløse connectoren i tempereret sæbevand, fx. i en skål.

Hold altid god hygiejne